


# ergotron®

---

## StyleView® Telemedicine Bin

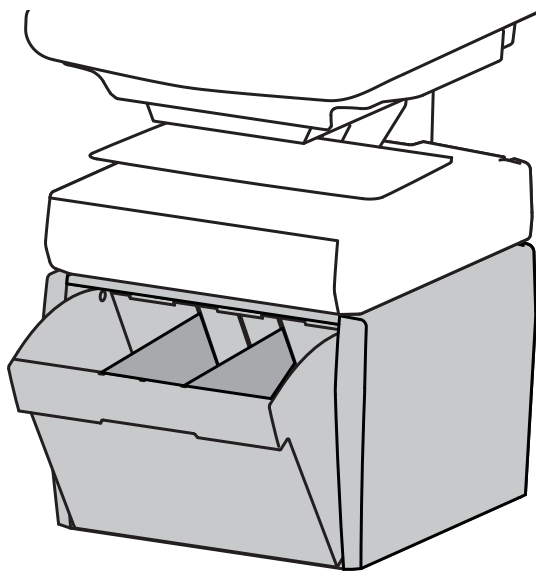

---



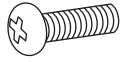


**Français**





Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).  
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语


[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

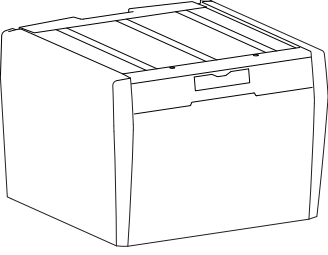---


	A	B	C
1	1x 	1x  2x  M4 x 12mm	1x  1x  M3 x 25mm

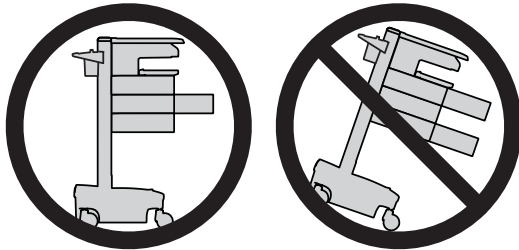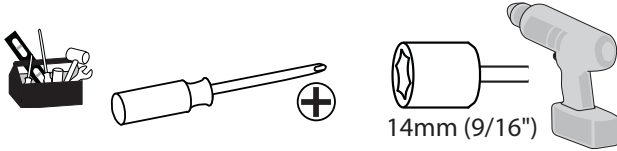

**ATTENTION : Fermez la surface de travail avant d'ouvrir les tiroirs. Ouvrez un tiroir la fois. Ne poussez pas le chariot lorsque les tiroirs ou la surface de travail sont ouverts. Danger de déséquilibre du chariot si les instructions ne sont pas respectées.**

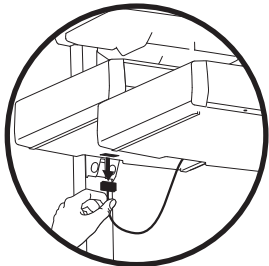

**REMARQUE :** Lorsque vous retirez les tiroirs du chariot, veillez à débrancher le câble.

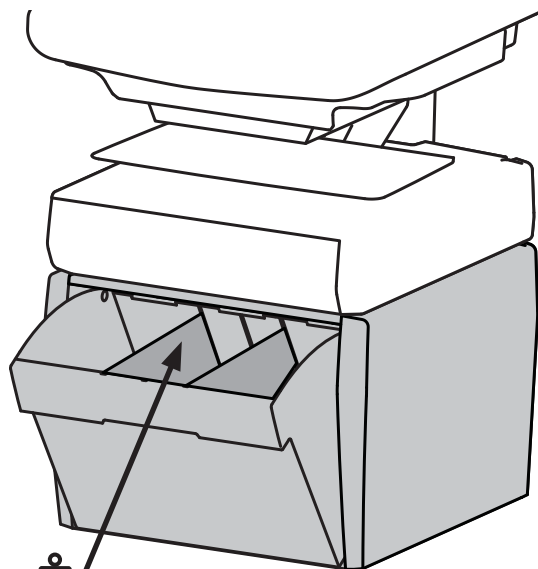

≤ 2 lbs (1 kg)

**⚠ AVERTISSEMENT**




**DANGER D'IMPACT !**  
LES PARTIES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER.

**Minimisez la tension d'élévation AVANT :**

- de retirer l'équipement fixé
- d'expédier le chariot
- de stocker le chariot


**Pour minimiser la tension d'élévation**

1. Abaissez la surface de travail à son niveau le plus bas.
2. Tournez l'écrou d'ajustement au-dessus du montant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt (l'ajustement peut nécessiter 40 à 60 tours).

**Il existe un risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cet avertissement.**

Pour plus d'informations et d'instructions, consultez le guide du produit sur <http://4support.ergotron.com>, ou contactez le service client d'Ergotron au (+1) 800 888-8458.


822-052

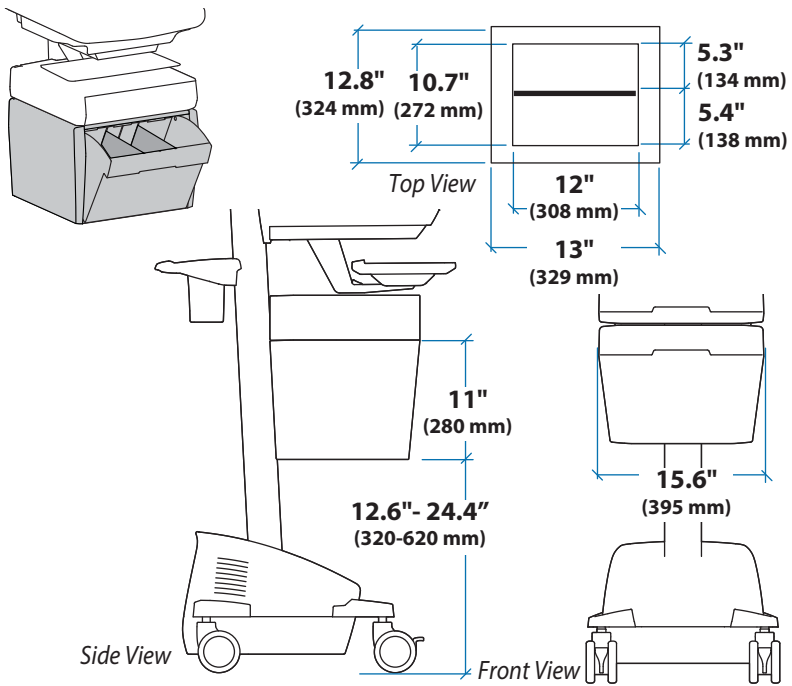


**1 a** Mettre hors tension tout matériel installé.




**b** Déconnecter le système d'alimentation de la source de courant.

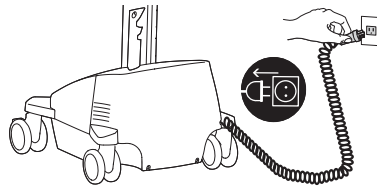

**c** Mettre le matériel hors tension en gardant enfoncé le bouton « AC Outlet Power » pendant 1 à 3 secondes. Le voyant d'alimentation s'éteindra.

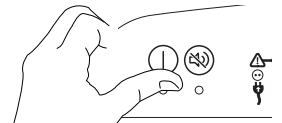


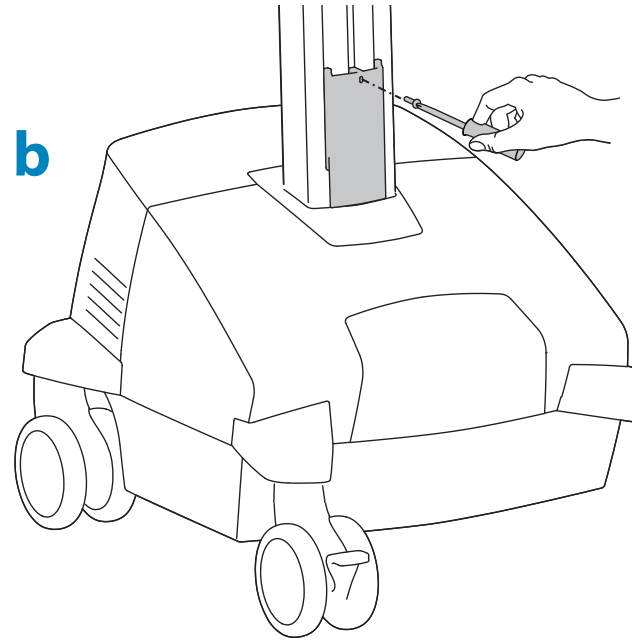
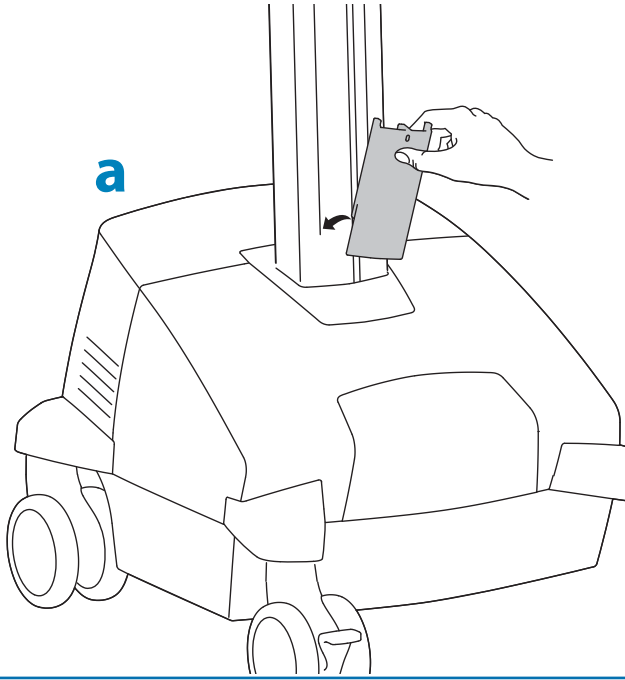
**d** Coupez l'alimentation du tiroir.

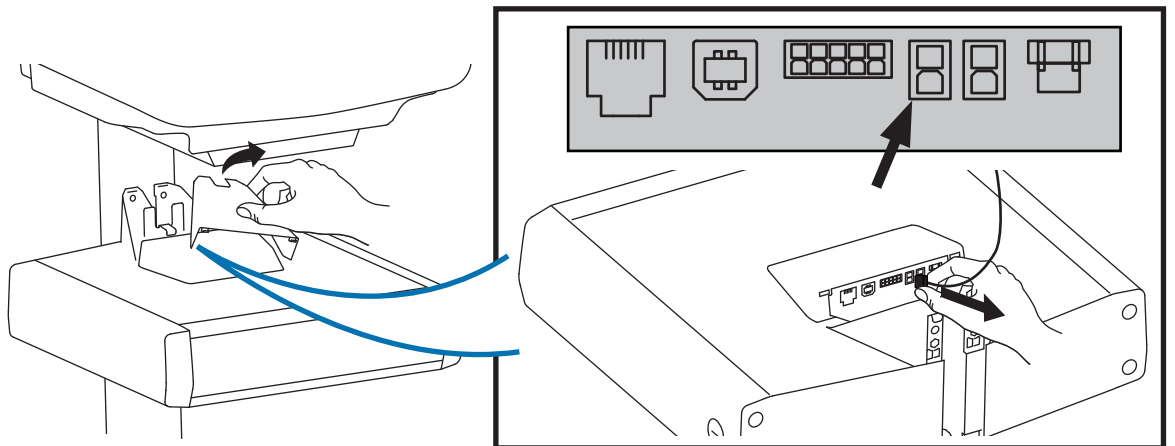

# 2



Fixez le support de la butée de la course sur le moteur de levage pour que le tiroir ne se heurte pas à la base.

1x  M3 x 25mm




# 3


Retirez le couvercle de la prise.

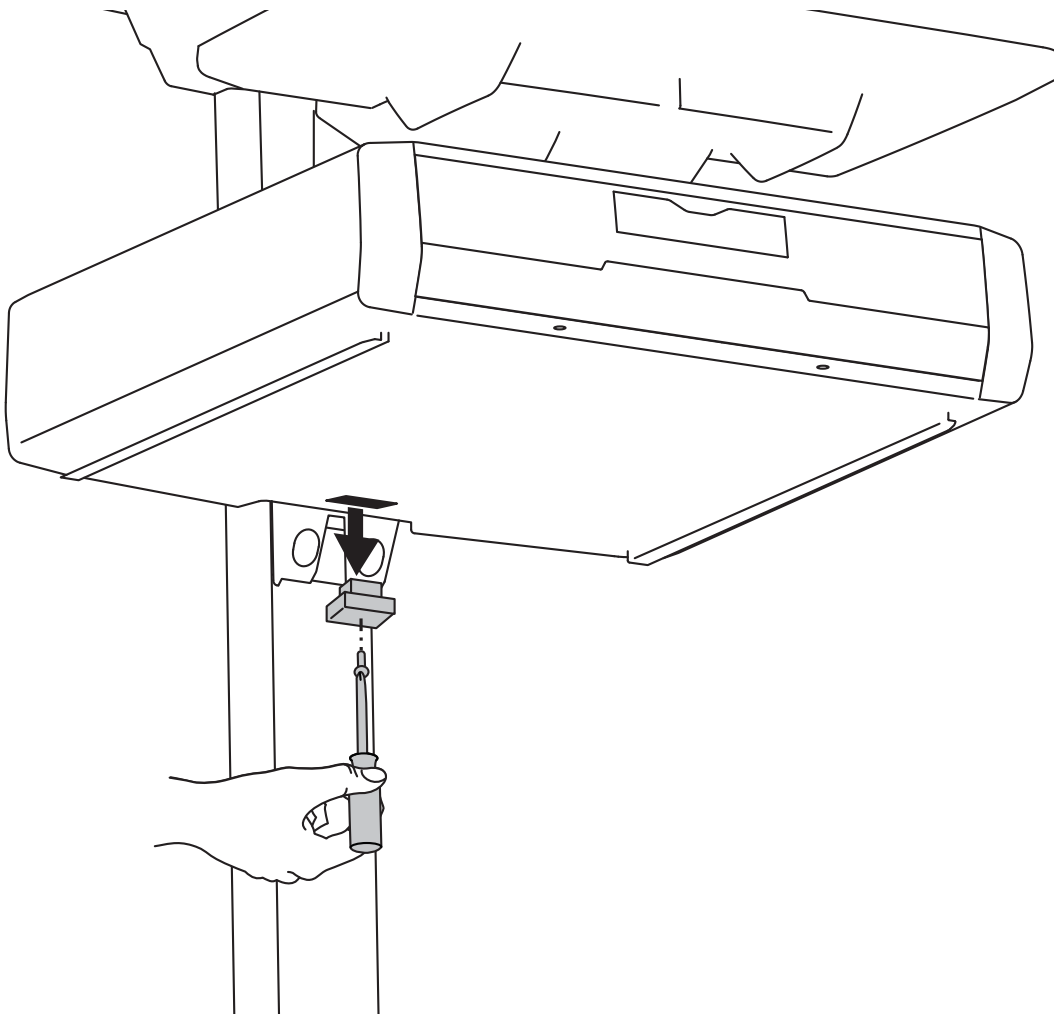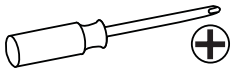


- 4** Glissez le tiroir uniquement à la moitié des rails inférieurs du tiroir supérieur.

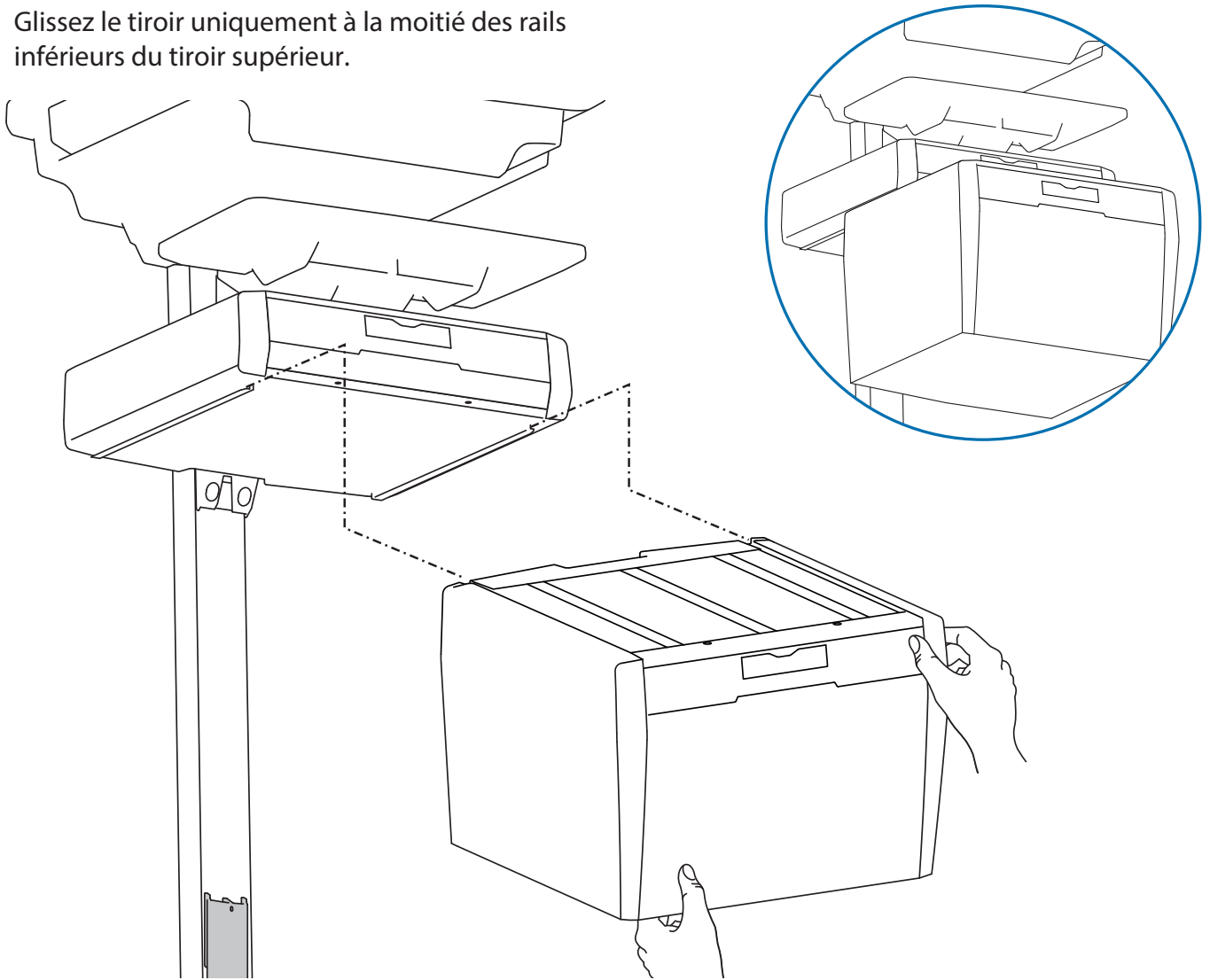


- 5 a** Branchez le câble du tiroir du bas dans la prise sur le fond du tiroir juste au-dessus.

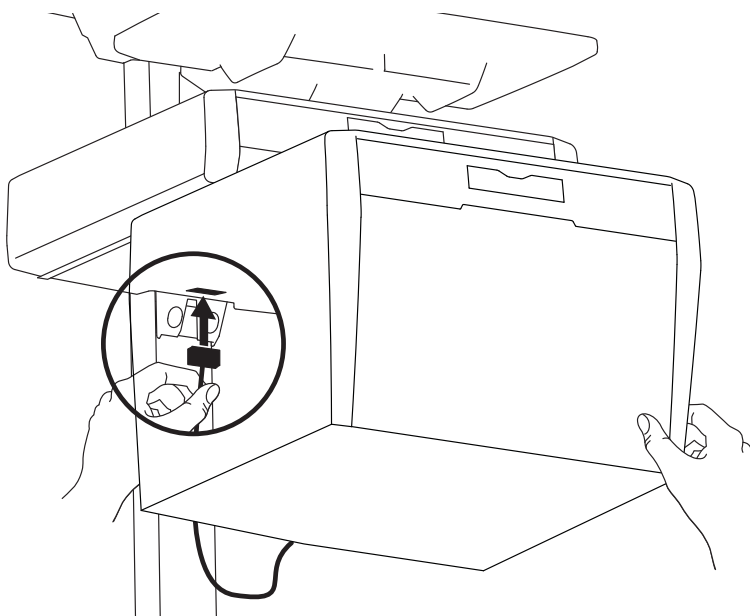


- b** Glissez le tiroir complètement sur les rails inférieurs du tiroir supérieur.

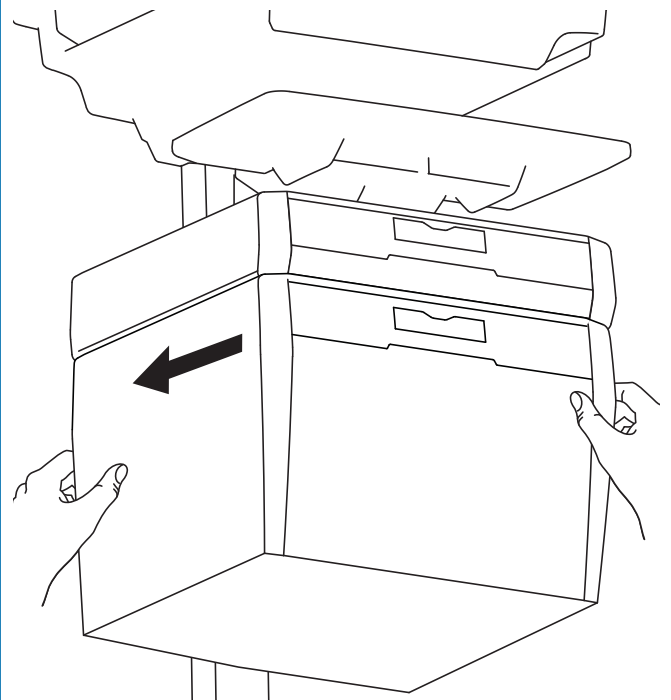

## 6 Retirez le(s) tiroir(s) supérieur(s).

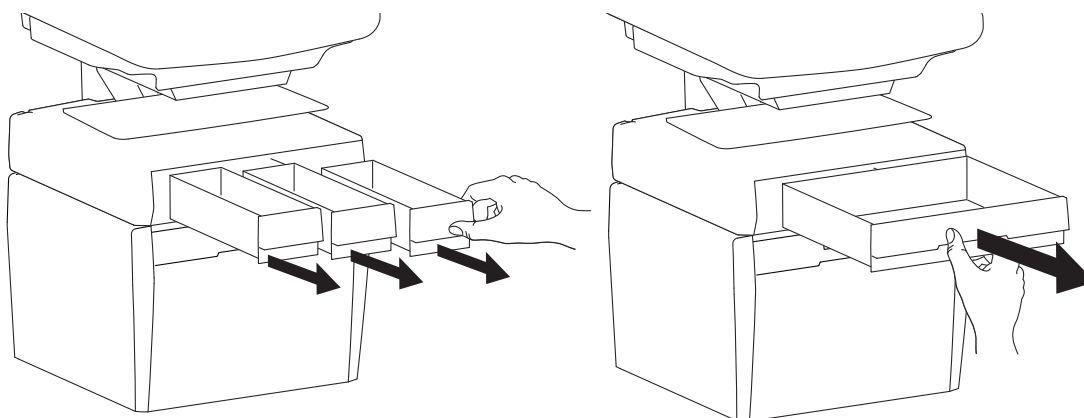


## 7 Sécurisez le tiroir inférieur en le fixant à l'aide des deux vis.

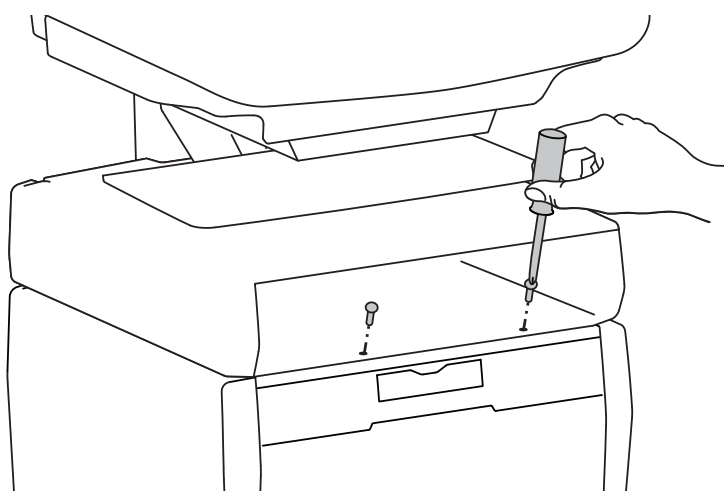


**2x**   
M4 x 12mm


## 8 Remplacez le(s) tiroir(s) supérieur(s).

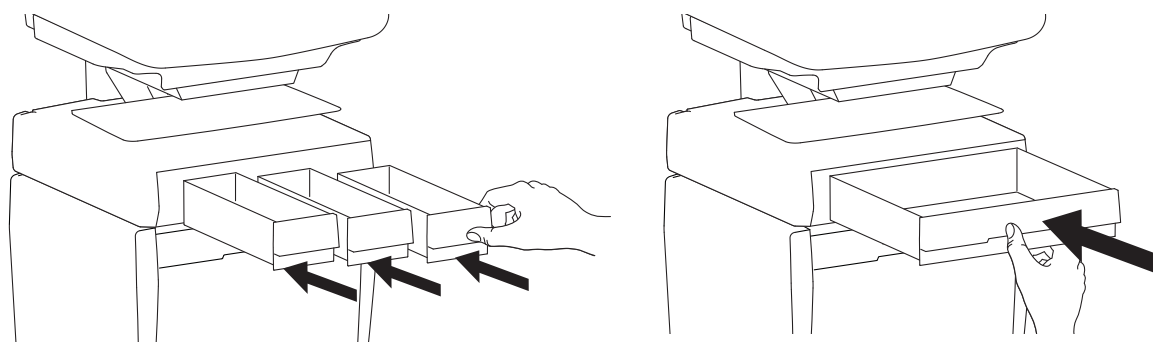

# 9 a Rebranchez le tiroir.

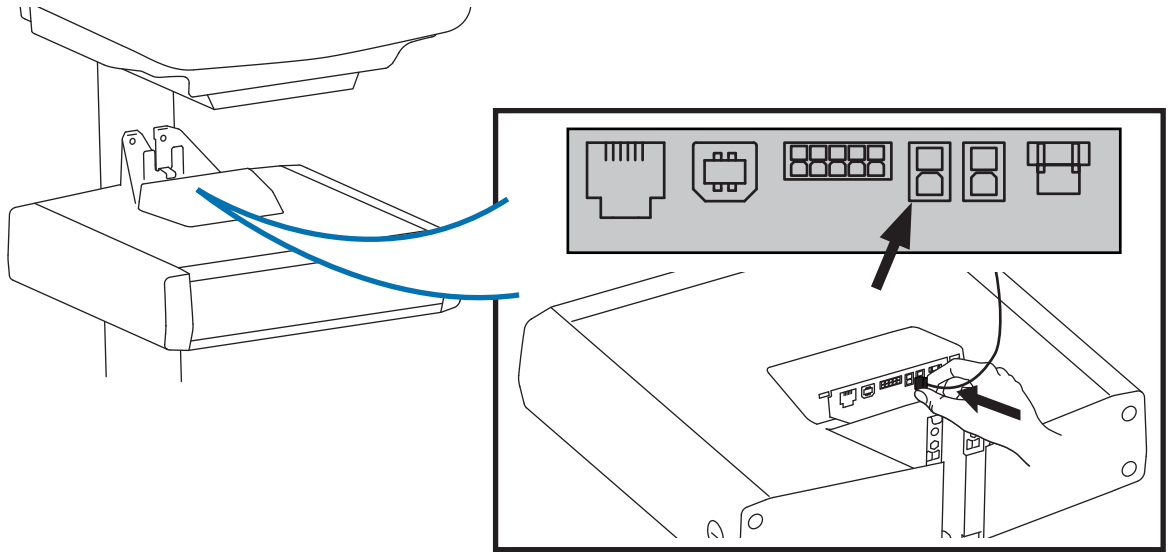

# b Replacez le couvercle supérieur sur le tiroir.

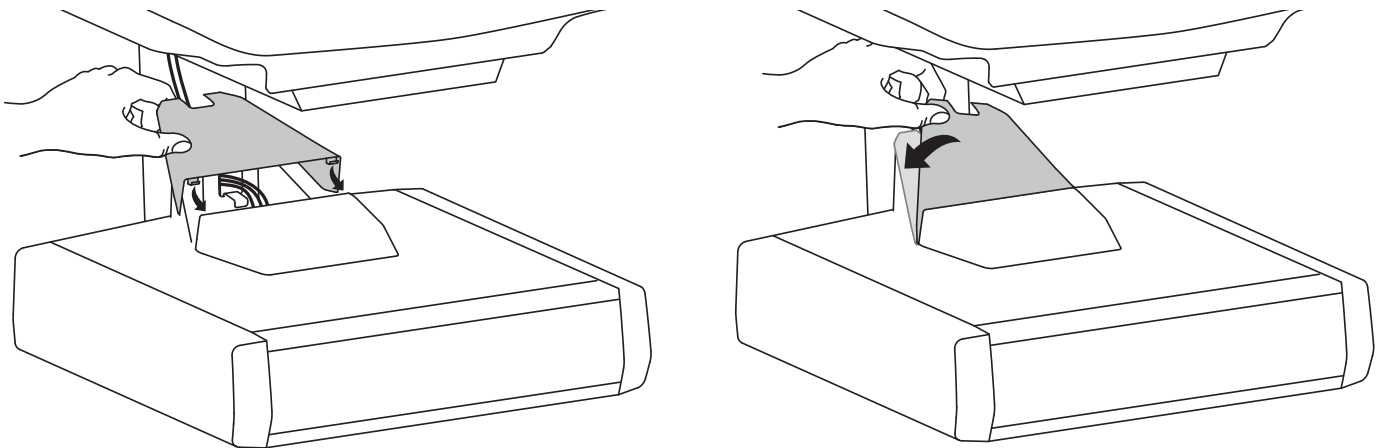


# 10 Réglage





Il est important de régler ce produit selon le poids de l'équipement monté tel que décrit dans les étapes suivantes. Chaque fois qu'une pièce d'équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.


Les réglages doivent permettre au produit de se déplacer sans difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l'endroit où il est réglé. Si les réglages sont difficiles et que le produit ne reste pas dans la position souhaitée, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension pour créer un mouvement de réglage lisse et facile. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s'avérer nécessaire pour remarquer la différence.

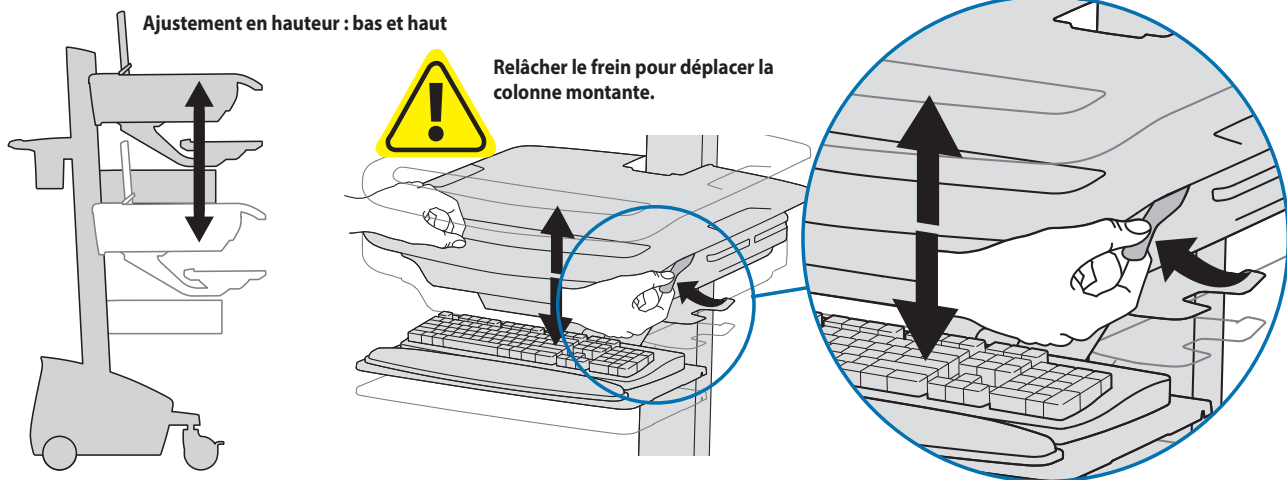

Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

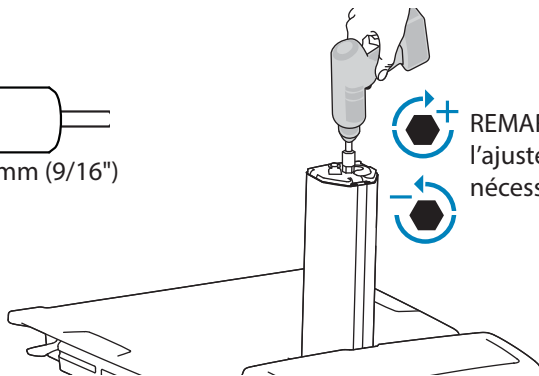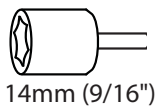


REMARQUE :  
l'ajustement peut  
nécessiter 40 à 60 tours.

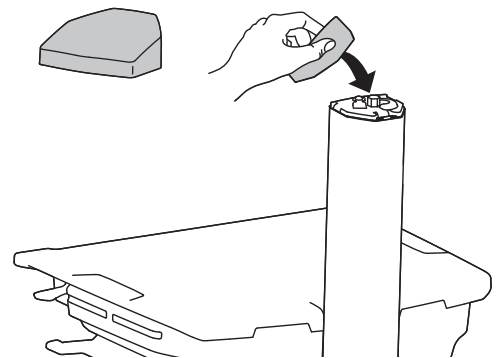



# 11



1x

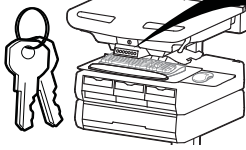

**Code PIN principal perdu**  
Contacter le service client d'Ergotron pour obtenir les instructions.

**REMARQUE : il est conseillé que l'utilisateur change le code PIN principal à la réception du chariot.**

**S'assurer que les batteries du système d'alimentation principal sont installées et qu'elles fonctionnent. Il n'est pas nécessaire d'allumer au niveau de l'interface du système d'alimentation.**

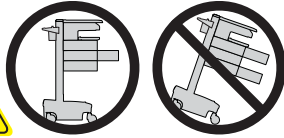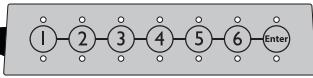

**ATTENTION :** Ouvrez un tiroir la fois. Ne poussez pas le chariot lorsque les tiroirs sont ouverts. Danger de déséquilibre du chariot si les instructions ne sont pas respectées.

**Codes secrets des utilisateurs :**

**Sans la gestion StyleLink :**

- les codes secrets définis sur le chariot et non gérés par StyleLink peuvent varier de 4 à 7 chiffres de long.
- Ergotron recommande de choisir comme suit la longueur du code secret (procédure qui assure moins de 1 sur 25 chances de deviner un code secret aléatoire) :
- Si le nombre maximum de codes secrets est supérieur à 50, il est recommandé d'utiliser des codes d'au moins 5 chiffres.
- Si le nombre maximum de codes secrets est supérieur à 300, il est recommandé d'utiliser des codes d'au moins 6 chiffres.
- Pour optimiser la sécurité, utilisez des codes secrets de 7 chiffres.
- Le chariot peut conserver jusqu'à 1000 codes secrets.

**Avec la gestion StyleLink :**

- Un maximum de 100 codes secrets par chariot.
- Les codes secrets doivent obligatoirement faire 5 chiffres de long.

## Configuration initiale du code PIN principal (par défaut : 12345)

Contactez le service client d'Ergotron pour obtenir des instructions en cas de perte du code PIN principal.

1. Composez le code secret maître par défaut (1-2-3-4-5) puis appuyez sur ENTRÉE.
2. Appuyez sur 5 pour sélectionner le mode de saisie du code secret maître.
3. Saisissez le nouveau code secret maître puis appuyez sur Entrée (les voyants clignotent en vert si le code secret est accepté).
4. Le mode de saisie du code secret maître se termine après 5 secondes d'inactivité (les voyants clignotent en rouge deux fois).

**Menu du code secret maître** (REMARQUE : Le code secret maître n'ouvre pas les tiroirs.)

Composez le code secret maître, puis sélectionnez l'un des numéros ci-dessous pour accéder à ce mode

1. Après avoir saisi le code secret maître, sélectionnez 1 pour accéder à la saisie des codes secrets d'utilisateurs
2. Après avoir saisi le code secret maître, sélectionnez 2 pour accéder à la saisie/modification du code secret de pharmacie
5. Après avoir saisi le code secret maître, sélectionnez 5 pour accéder à la modification du code secret maître

**Menu du code secret maître** (suite)

- 6, 1. Après avoir saisi le code secret maître, sélectionnez 6 puis 1 pour couper l'alarme.
- 6, 6, code secret maître, Entrée. Après avoir saisi le code secret maître, sélectionnez 6 puis de nouveau 6, puis composez de nouveau le code secret maître, et enfin sélectionnez Entrée. Ceci permet de restaurer la valeur d'usine du code secret maître, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, et effacera également tous les codes secrets personnels et celui de la pharmacie.

## Programmation des codes secrets d'utilisateur

1. Composez le code secret maître puis appuyez sur ENTRÉE pour passer au mode Menu.
2. Appuyez sur 1 pour sélectionner le mode de saisie de codes secrets d'utilisateur.
3. Saisissez un nouveau code secret d'utilisateur et appuyez sur ENTRÉE (tous les voyants clignotent en vert si le code secret est accepté). Vous pouvez définir plusieurs codes d'utilisateur à la suite.
4. Le mode de saisie des codes secrets d'utilisateur se termine après 5 secondes d'inactivité (les voyants clignotent en rouge deux fois).


**REMARQUE :** les codes secrets d'utilisateurs doivent être différents du code secret maître et du code secret de pharmacie. Lorsque le nombre maximum de code secret d'utilisateurs est dépassé, le code secret d'utilisateur le plus ancien sera effacé pour faire place au nouveau.

## Programmation du code secret de pharmacie


1. Composez le code secret maître puis appuyez sur ENTRÉE pour passer au mode Menu.
2. Appuyez sur 2 pour sélectionner le mode de saisie du code secret de pharmacie.
3. Saisissez le code secret de pharmacie et appuyez sur ENTRÉE (tous les voyants clignotent en vert si le code secret est accepté).
4. Le mode de saisie du code secret de pharmacie se termine après 5 secondes d'inactivité (les voyants clignotent en rouge deux fois).

Remarque : Le système ne maintient qu'un seul code secret de pharmacie. Le code secret de pharmacie permet de déverrouiller tous les tiroirs à la fois. Les tiroirs doivent ensuite être ouverts au moins légèrement, car le système les reverrouillera automatiquement après 15 secondes. Tous les voyants clignotent en vert jusqu'à ce reverrouillage. Une fois qu'un tiroir est ouvert, le voyant de la rangée correspondante reste allumé sans clignoter jusqu'à ce que le tiroir soit refermé. Si les tiroirs ont été retirés du chariot pour le réapprovisionnement, ils doivent être remis en place dans la même configuration par ligne. S'ils ne le sont pas, il faut mettre le chariot hors tension puis de nouveau sous tension afin que le système de tiroir se reconfigure.

Pour déverrouiller un tiroir (2 méthodes) : **REMARQUE :** Tous les tiroirs de la rangée doivent être fermés avant qu'une autre rangée ne puisse être déverrouillée.  
• Composez le code secret de l'utilisateur (seuls les numéros des rangées de tiroirs disponibles clignotent en vert), puis appuyez sur le numéro de rangée souhaité\*.  
• Avec la clé : la tourner de 1/4 tour dans le sens horaire

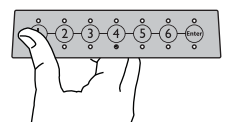

**\*Numéros de tiroir :**

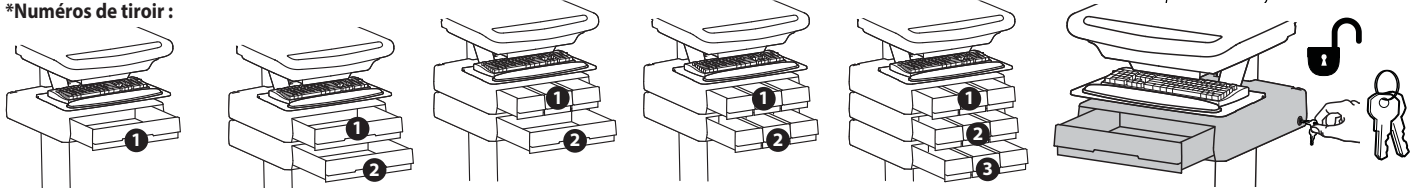

**Tiroir verrouillable :**

- Attendez 4 secondes que le verrou s'engage automatiquement.
- REMARQUE :** Vérifiez toujours que vous avez poussé le tiroir à fond et qu'il s'est enclenché dans le mécanisme de verrouillage.

## Dépannage des tiroirs


- Aucun voyant ne s'allume sur le clavier lorsque vous appuyez sur un numéro, quel qu'il soit :
- Vérifiez que le câble d'alimentation CC est branché entre le bloc batterie du chariot et le contrôleur.
- Vérifiez que le câble du clavier est connecté au contrôleur.
- Vérifiez que les disjoncteurs ne sont pas ouverts et que le fusible de 5 A est installé dans le bloc batterie.
- La sélection de tiroir n'est pas disponible après la saisie du code secret de l'utilisateur :
- Vérifiez que le câble du tiroir est bien installé.
- Coupez l'alimentation du système de tiroir pendant 10 secondes et rétablissez-la.
- Les voyants clignotent en rouge/vert après la saisie du code secret de l'utilisateur :
- La charge de la batterie est faible, vérifiez que le câble de recharge USB est branché sur l'ordinateur et que ce dernier est allumé.

Signification des voyants et des alarmes :

- Voyant 1, 2, 3, 4 ou 5 allumé en vert : le tiroir correspondant est ouvert.
- Voyant 1, 2, 3, 4 ou 5 clignotant en rouge en même temps que l'alarme sonne : le tiroir correspondant est ouvert depuis plus de 20 secondes. Annulez l'alarme en appuyant sur le bouton clignotant correspondant au tiroir ouvert.
- Tous les numéros de tiroirs disponibles sont au vert clignotant : en attente de la sélection de tiroir (voir Pour déverrouiller un tiroir).
- Tous les voyants clignotent en rouge à deux reprises : Code secret refusé/le mode en cours se terminera après un délai d'inactivité de 5 secondes.
- Tous les voyants clignotent en vert 3 fois : code secret accepté.
- Tous les voyants sont au rouge clignotant : mise à jour du micrologiciel en cours.
- Tous les voyants clignotent en rouge et vert : mise sous tension ou batterie faible.

# 12


Tiroir de rangement – comprend des séparations, 3 ports USB à l'intérieur et 2 ports USB à l'arrière du tiroir. Jusqu'à 1,80 m de longueur pour les câbles USB des appareils rangés à l'intérieur.

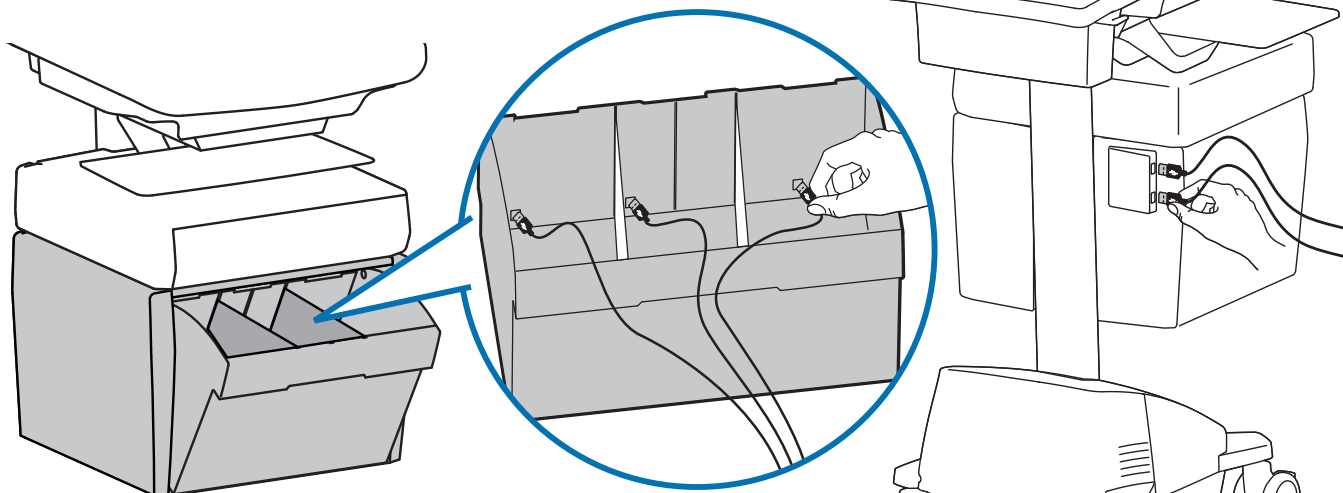


# 13

## Options de configuration des séparateurs


3 compartiments

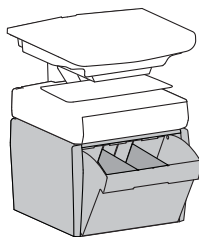

2 compartiments

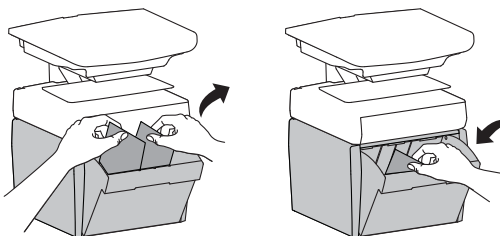

1 compartiment

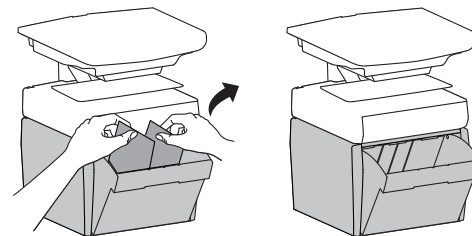

# ergotron®

Pour la garantie, visitez: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)

Pour le service client, visitez: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information de produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.