


ergotron®

StyleView® Primary Storage Drawer

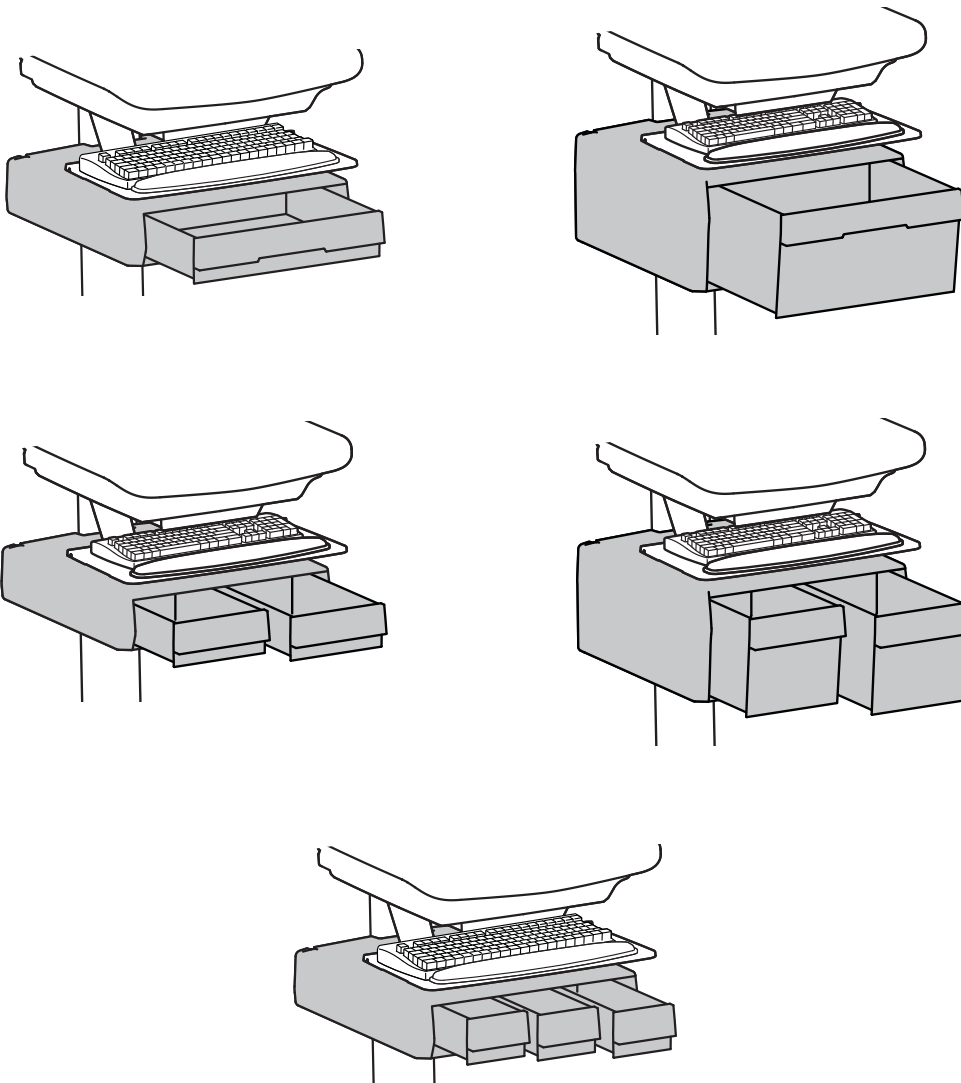

汉语







若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语


www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

危险标志回顾

这些标志提醒用户需要注意的安全状况。如果在产品上或者在文件中遇到以下标志，所有用户应能够识别和理解这些安全标志的含义。无法识别并对安全警报作出相应反应的儿童必须在成年人的监督下使用本产品！

| 标志 | 信号文字 | 危险等级 |
|---|------|---|
|  | 注 | “注”表示可以帮助您更好地使用本产品的重要信息。 |
|  | 小心 | “小心”表示可能损坏硬件或丢失数据，告诉您如何避免。 |
|  | 警告 | “警告”表示潜在的财产损失、人员伤亡。 |
|  | 电气 | “电气”表示可能的电气危险，如果不能避免，可能会导致人员受伤、火灾和/或死亡。 |

安全性

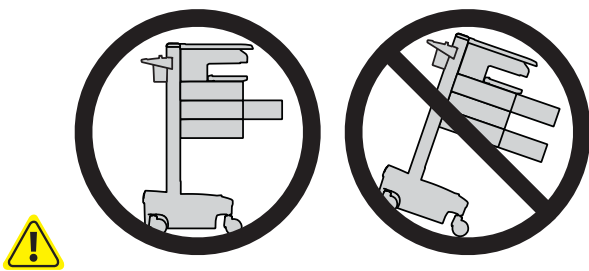

注意：在打开抽屉前关闭工作面。一次只能打开一个抽屉。当抽屉或工作面打开时切勿推车。不遵守上述指示可能导致推车失衡。

警告



撞击危险！

手推车移动会导致挤压和割伤。
先将升降张力调节至最小，然后再：

- 卸除所安装设备
- 装运手推车
- 存放手推车

要将升降张力调节至最小：


1. 将工作台面降至最低位置。
2. 逆时针旋转升降杆顶部的调节螺母，直到转不动为止（调节可能需要旋转40-60度）。


不留心此警告可能会导致严重的人身伤害或财产损失！

欲了解更多信息或说明，请参阅 <http://4support.ergotron.com> 上的产品指南或致电 1-800-888-8458 联络 Ergotron 客户服务。


822-052

特点和规格




 注意：请勿超过所列的最大可承重量。否则可能导致重伤或设备损坏！

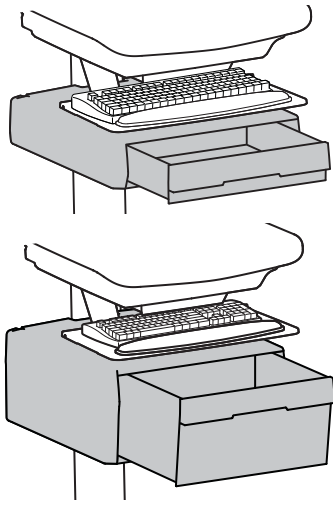




≤ 2 lbs (1 kg)
每个抽屉的总可承重量：

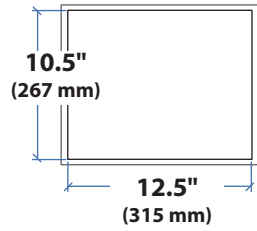


2.5"
(64 mm)

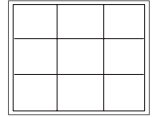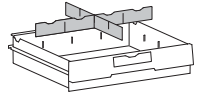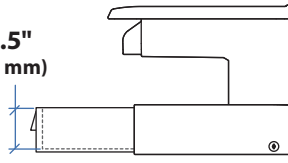



6"
(152 mm)

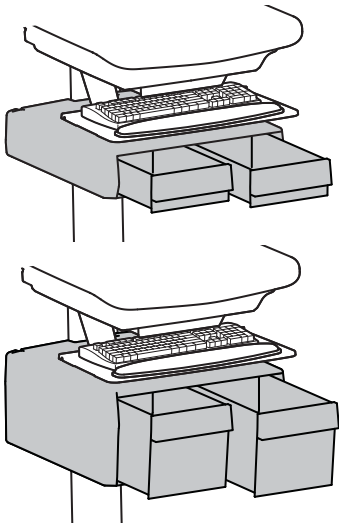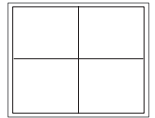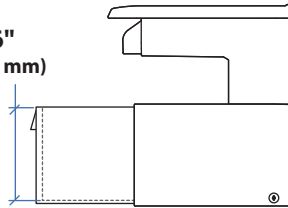





≤ 1 lbs (0.5 kg)
每个抽屉的总可承重量：

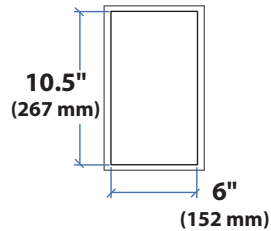





2.5"
(64 mm)

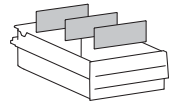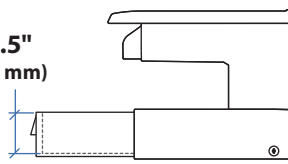



6"
(152 mm)

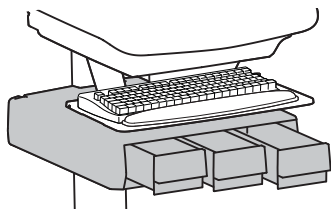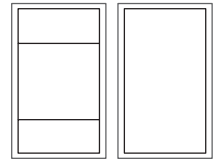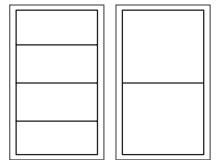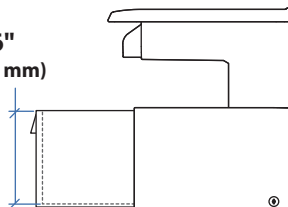

≤ 0.25 lbs (0.1 kg)
每个抽屉的总可承重量：

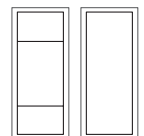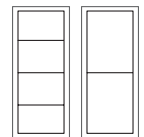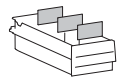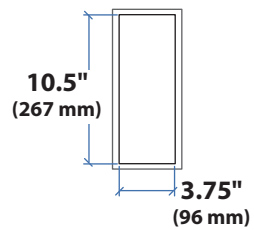

需要的工具

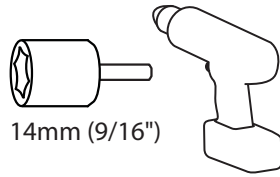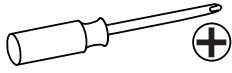



部件

| | A | B | C |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 1x | 2x M6 x 43mm | 2x M6 x 15mm |

This manual covers the installation of 5 possible drawers.
There is only 1 drawer provided in this box.


| | A | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 1 个抽屉 1x | 3x 3x |
| 3 | 1 个抽屉 1x | 2x 2x |
| 4 | 2 个抽屉 1x | 6x |
| 5 | 2 个抽屉 1x | 6x |
| 6 | 3 个抽屉 1x | 9x |

1 拆除顶盖。

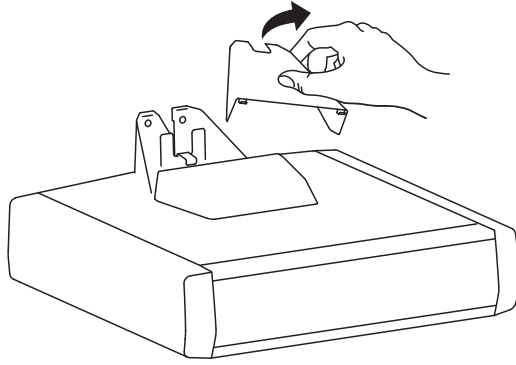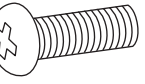


2 将抽屉舌片挂在推车上的托架上。


a

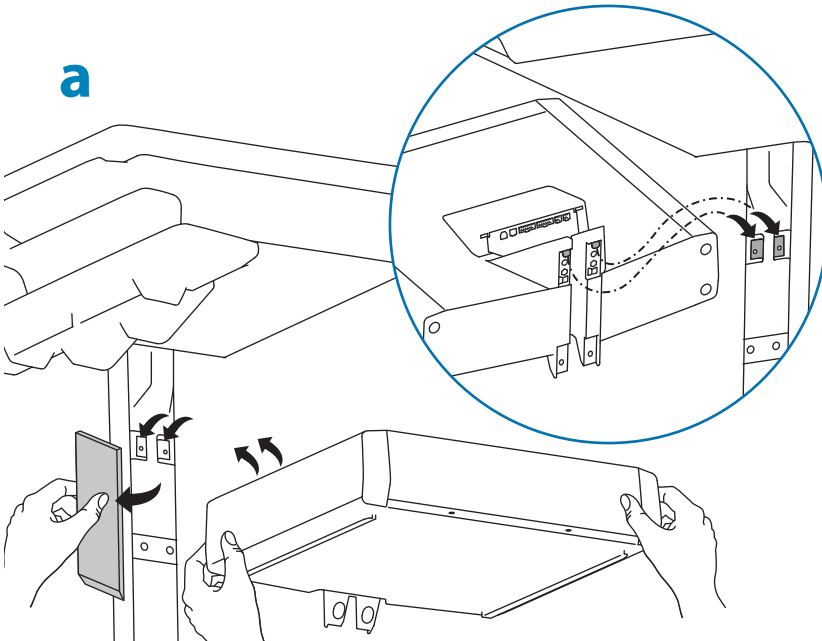


b 2x

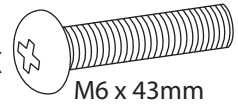


M6 x 43mm

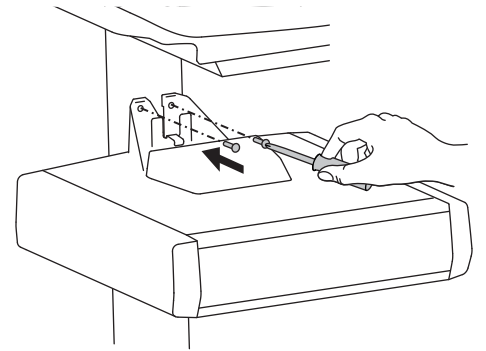



c

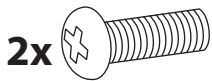



M6 x 15mm

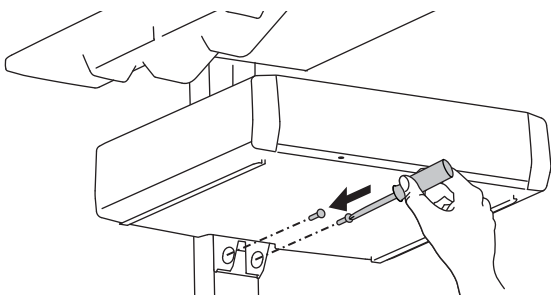



针对抽屉柜

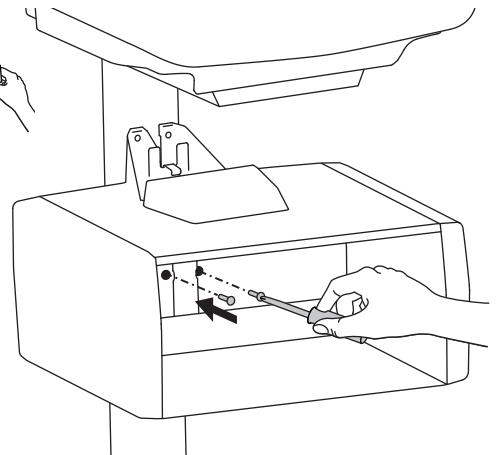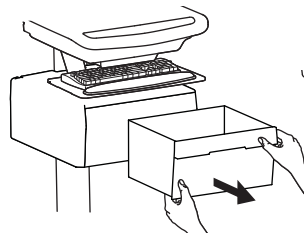

3 盖上抽屉的顶盖。

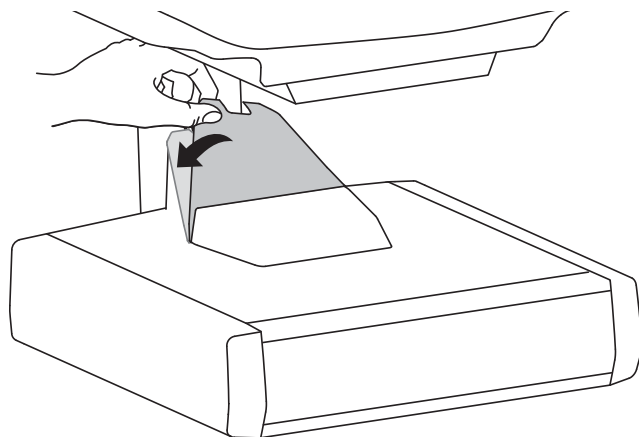
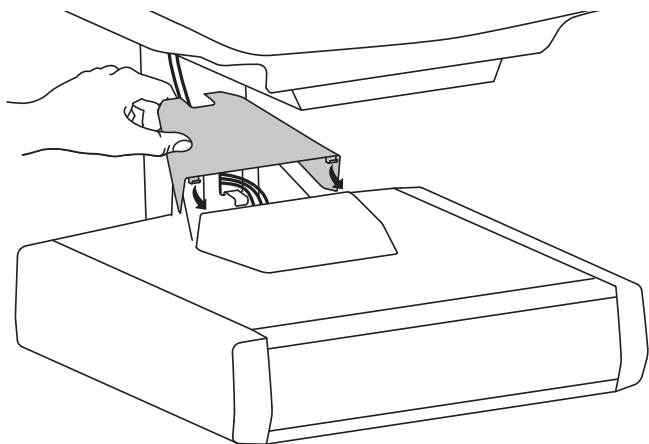


4 要打开存储抽屉，逆时针旋转钥匙 1/4 圈。

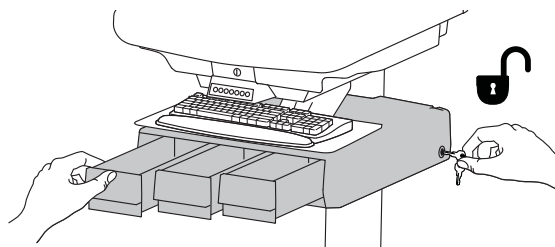
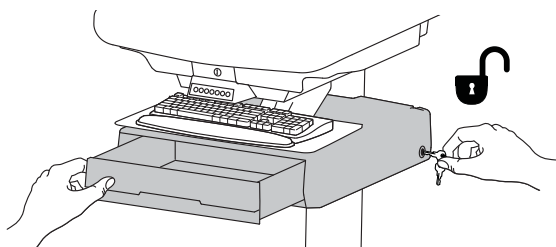


5 调节


调节安装产品，以承受所增加的重量。
根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。

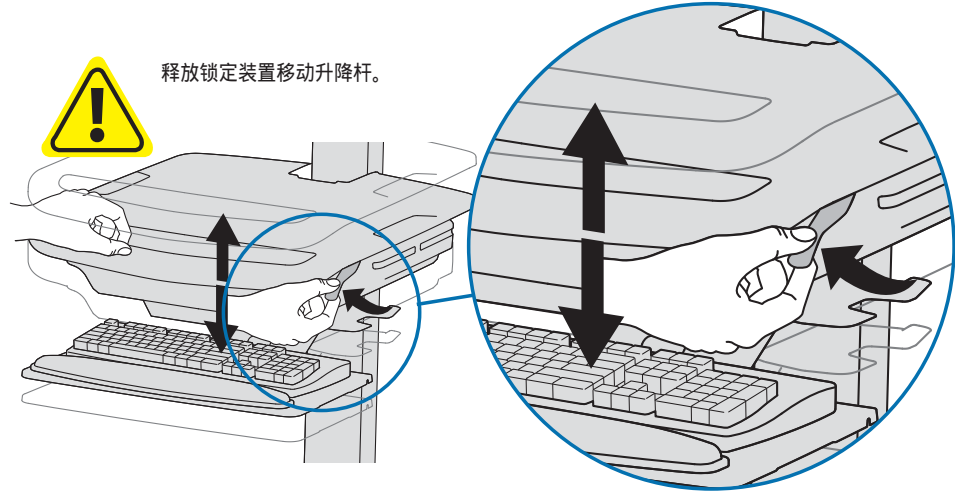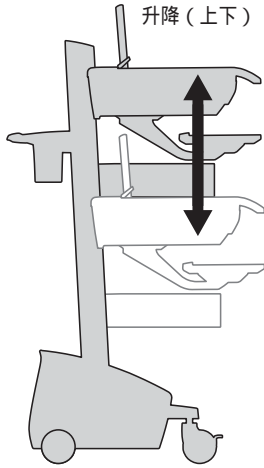

遵照这些说明拧紧或拧松。

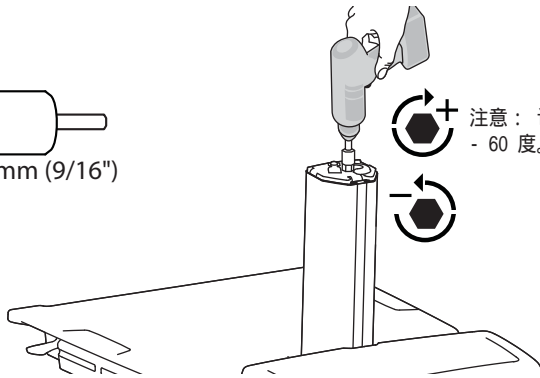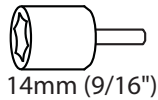

注意：调节可能需要旋转 40 - 60 度。

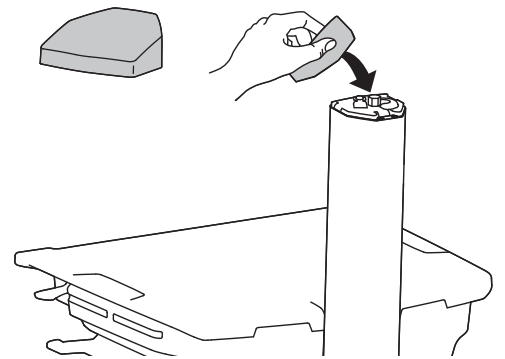

ergotron®

为保证参观: www.ergotron.com/warranty

对于上门服务: www.ergotron.com

若需当地客户服务电话号码, 请访问: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Ergotron Inc. 尽力提供安装和使用其产品的精确和完整的资料, 但是, Ergotron 对任何编辑错误或疏漏 (包括在从英文翻译到其它语言过程中发生的错误) 不负任何责任, 亦不对由于实施该安装指南或者进行与该指南相关的设备操作而引致的任何性质的偶然的、特别的或随之发生的损坏负有任何责任。Ergotron, Inc. 保留对产品设计和/或产品文件进行修改的权利, 而无需向用户发出通知。要获得最新的产品资料, 或了解本文件是否可提供其它语言版本, 请联络 Ergotron。未经 Ergotron, Inc. (地址: 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA) 预先书面同意, 不得以任何形式或者通过任何方式 (电子、机械、影印、记录或其它方式) 对本文件的任何部分进行复制、储存在可索取系统中, 或进行传播。在美国和外国正在申请的和已登记专利。Ergotron 是 Ergotron, Inc. 的注册商标。