

ergotron®

moving you forward

Recomendaciones de limpieza en el sector sanitario

Puede usar la mayoría de soluciones de limpieza de hospital no abrasivas, no corrosivas y diluidas en todas las superficies de plástico y metal, tanto si son pintadas, pulidas o sin tratar. Esto incluye compuestos de amonio cuaternario, limpiadores de enzimas con amoníaco, agua oxigenada, lejía o soluciones a base de alcohol.

Consejos útiles:

- Asegúrese de probar cualquier solución de limpieza en una zona pequeña y no visible antes de su uso.
- Los bolígrafos, rotuladores permanentes y marcadores de borrado en seco deberán quitarse con alcohol isopropílico al 91% y un paño seco.
- Las manchas de yodo se quitan con limpiadores comunes y un trapo suave.

Por su seguridad y para proteger su carro médico:

- Nunca use lana de acero ni otros materiales abrasivos que estropeen el acabado de la superficie.
- No use disolventes fuertes como el tricloroetileno y la acetona, ya que pueden estropear el acabado de la superficie
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no exponga los componentes eléctricos al agua, soluciones de limpieza u otros líquidos y sustancias potencialmente corrosivos.
- No sumerja el carro o los componentes del carro en ningún líquido ni permita que penetren líquidos en el carro. Retire todos los limpiadores de la superficie inmediatamente con un trapo húmedo y seque la superficie tras la limpieza.
- No use limpiadores inflamables en las superficies del carro debido a la proximidad con la corriente eléctrica.



Consulte a su epidemiólogo o encargado de control de infecciones sobre los procesos y procedimientos de limpieza.

Para controlar mejor las infecciones, le rogamos limpie, higienice y esterilice todo el equipamiento de Ergotron antes de su primer uso y frecuentemente durante el mismo, de conformidad con las directrices de los organismos sanitarios aplicables. Esto incluye la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud y las directrices del sector sanitario. Las directrices están en constante evolución, por lo que le rogamos consulte estos sitios con frecuencia.

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.

Ventas en EMEA:

Amersfoort, The Netherlands / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

Ventas en LATAM:

México / +1.800.681.1820 / info.latam@ergotron.com

© Ergotron Inc. 28.06.2021

Documentación elaborada en EE.UU.

Contenido sujeto a cambios sin previo aviso.

Los dispositivos de Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir ninguna enfermedad.

Información sobre patentes: www.ergotron.com/patents

