

ergotron®

moving you forward

ヘルスケアクリーニングの推奨事項

ほとんどの病院グレードに希釈された、非研磨、非腐食性の洗浄液は、塗装、研磨、未塗装のすべてのプラスチックおよび金属表面に使用できます。これには、第四級アンモニア化合物、アンモニア酵素クリーナー、過酸化水素、漂白剤またはアルコール溶液が含まれています。

役立つヒント：

使用前に、小さな人目に付きにくい箇所で必ず洗浄液をテストしてください。

ペンおよび永久消去マーカーと、乾燥消去マーカーは、91%のイソプロピルアルコールと柔らかい布で取り除いてください。

• ヨード染色は一般的に使用されているクリーナーと柔らかい布で取り除くことができます。

あなた自身の安全のため、および、

医療カート

• スチールワールやその他の研磨材は、表面仕上げを損傷する可能性があるため、使用しないでください。

トリクロロエチレンやアセトンなどの強力な溶剤は、表面仕上げに損傷を与える可能性があるため、使用しないでください。

感電の原因となるため、電気部品を水、洗浄液またはその他の腐食性のある液体や物質にさらさないでください。

カートやカート部品を液体に浸したり、液体がカートに流れこんだりしないようにしてください。湿った布を使用して、すぐに表面のすべてのクリーナーを拭き取り、クリーニング後に表面を

乾燥させます。

電源に近い場合、カートの表面には

可燃性のクリーナーを使用

しないでください。



すべてのクリーニング手順とプロセスについては、必ず病院の感染制御管理者または伝染病学者に相談してください。

追加リソースは、ergotron.com からダウンロードしてください。
詳細は以下のとおり。
北米+1.800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC: apaccustomerservice@ergotron.com
OEM: info@oem.ergotron.com

© Ergotron, Inc.10.01.2019
バンフレットは米国製です
内容は変更されることがあります。
Ergotronのデバイスは、治療、緩和または予防用ではありません。
特許情報は、www.ergotron.com/patentsから入手できます。

日本語

